

Zeitaufwendige Aufbereitung
der Edelstahlpumpe entfällt

Einmalpumpe Eurospender 1 plus

Die hygienisch sichere und einfache Lösung
für den Einmalgebrauch



Mit umfassenden Wirksamkeitsnachweisen und einer wissenschaftsbasierten Forschung und Entwicklung gewährleisten wir bei unseren Produkten zur Hygiene und Desinfektion einen bestmöglichen Qualitätsstandard.
Wir forschen für den Infektionsschutz.

Einmalpumpe Eurospender 1 plus

Die einfache Lösung, die nicht nur ein Höchstmaß an Hygiene sicherstellt, sondern auch den Aufbereitungsaufwand der Edelstahlpumpe überflüssig macht.


Charakteristik

- Kunststoff-Pumpe für den Einmalgebrauch
- aufwendige Aufbereitung der Edelstahlpumpe entfällt
- einfaches Austauschen der Pumpe beim Flaschenwechsel
- geeignet für Hände-Desinfektionsmittel und Waschlotionen
- geeignet auch für Pflegelotionen (mehrmaliges Anpumpen)
- einsetzbar für Eurospender 1 plus für 350/500 ml- und 1000 ml-Flaschen von HARTMANN
- einzelverpackt im Beutel für hygienisches Einsetzen der Pumpe


Technische Daten

- Dosiermenge: 1,3 ml pro Hub (nicht einstellbar)
- nicht spülmaschinengeeignet, nicht autoklavierbar


Montageanleitung der beiden 500 ml- und 1 l-Einmalpumpen

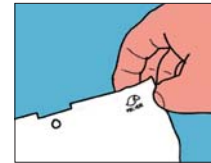

1. An der auf der Verpackung gekennzeichneten Stelle ziehen

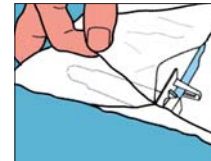


2. Öffnen Sie die Verpackung an der Seite des Pumpenzylinders

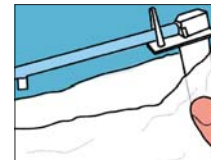

3. Nehmen Sie die Einweg-Pumpe mit der Verpackung in die Hand



4. Setzen Sie die Einweg-Pumpe in den Spender ein

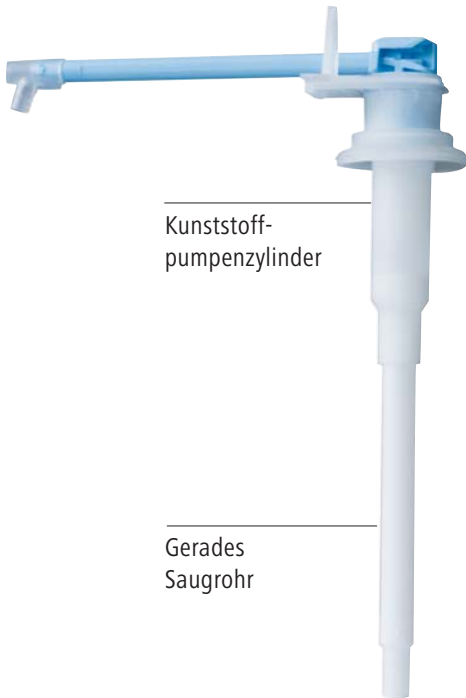

Kunststoff-pumpenzylinder

Gerades Saugrohr

	Packungs-inhalt	Artikel-Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen	
Einmalpumpe Eurospender 1 plus					
	für 500 ml-Flaschen	1 Stück	981 385	10764135	1
	für 1000 ml-Flaschen	1 Stück	981 384	10763874	1